



MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

ul. Klonowa 23/3 25-553 Kielce
tel. 881-400-441, 517-322-233,
www.micerdent.pl, info@micerdent.pl

ENAMEL *plus* HRI EASY GUIDE „ JAK DOBRAĆ KOLOR ”

PAMIĘTAJ DOBIERAJ KOLOR ZAWSZE NA MOKRYCH ZĘBACH !

KROK 1. Wybierz kolor zęba – zębina

W okolicy przyszyjkowej nanieś niewielką ilość wybranych odcieni UD (np. UD2 lub UD3) spolimeryzuj i wybierz właściwy dla pacjenta.

KROK 2. Wybierz jasność zęba – szkliwo

W części środkowej korony nanieś niewielką ilość wybranych odcieni UE (np. UE1 lub UE2) spolimeryzuj i wybierz właściwy dla pacjenta.

JAK POPRAWIĆ PLASTYKĘ MATERIAŁU?

Oczyść rękawiczkę spirytusem (najlepiej kciuk), połóż porcję materiału i lekko dociśnij nakładaczem, pozostaw na 5 – 7 sekund. Ogrzany od ciepła dłoni materiał stanie się bardzo plastyczny.

Nie przesuwaj materiału na rękawiczkę , NIE RÓB KULECZEK! Zanieczyszczony w ten sposób kompozyt będzie szary i opakerowy.

JAK UNIKNĄĆ WIDOCZNEJ GRANICY?

Po wykonaniu preparacji wiertłem wypoleruj ją koniecznie naszą brązową gumką do polerowania szkliwa – 16 zł /szt. Zapewni ona odpowiednie rozproszenie światła w granicy przejścia. Resztą zajmie się wysoki współczynnik złamania światła w Enamel Plus HRI.

I SPRAWA ZAŁATWIONA ☺

JAK POLEROWAĆ ?

Enamel Shiny to zestaw zawierający białą gumeczkę i pasty diamentowe A,B,C
Wstępne polerowanie białą gumką na niskich obrotach bez nacisku

Pasty w kolejności alfabetycznej po 20 sekund każdą

A - mikroskopijna ilość pasty roztarta na powierzchni odbudowy + szczoteczka

B - mikroskopijna ilość pasty roztarta na powierzchni odbudowy + szczoteczka

C - mała ilość pasty roztarta na powierzchni odbudowy + filc

ZAWSZE POLERUJ BEZ NACISKU BO NIE BĘDZIE POŁYSKU ☺

WIĘCEJ WSPARCIA!

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę edukacyjną!

Osoby pracujące materiałem Enamel Plus HRI zapraszamy na WARSZTATY MATERIAŁOWE.

Więcej informacji na www.micerdent.pl