



MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

ul. Klonowa 23/3, 25-553 Kielce

tel. 881-400-441, 603-997-373, 517-322-233

www.micerdent.pl, info@micerdent.pl

Tender Repair

Zestaw do naprawy prac z porcelany i na metalu

Unikalne właściwości:

- doskonałe dopasowanie kolorystyczne
- do stosowania z lampami polimeryzacyjnymi
- brak mikropęknięć i zmian koloru na połączeniu porcelana-kompozyt
- wysoka biogodność
- brak ryzyka dla tkanek
- lepsza adhezja

Instrukcja stosowania

Zalecana stosowanie koferdamu. Schropowacić powierzchnię ceramiki lub metalu przy użyciu wiertła diamentowego. Oczyścić, przedmuchać, powierzchnia musi pozostać całkowicie sucha (gwarancja mocnego połączenia).

Przy użyciu pędzelka nanieść na powierzchnię metalu i ceramiki cienką warstwę systemu łączącego Tender Bond. Osuszać przez ok. 1 minutę (warstwa bondu nie może pozostać zbyt wilgotna). Można w tym celu stosować sprężone powietrze (jedynie pod niskim ciśnieniem).

Następnie nanieść pastę **Opaque Clear** na pobrzeże **porcelany** cienką warstwą i utwardzać przez 40 sekund przy użyciu lampy polimeryzacyjnej. Jest to niezbędny element do zapewnienie optymalnego połączenia.

Kolejno pokryć odstąpiony **metal** przy użyciu pasty **Opaque O2**, nakładanej cienką warstwą i polimeryzować przez 40 sekund.

Nanieść materiał kompozytowy Enamel Plus HFO wg zasad techniki warstwowej.

Opracować i wypolerować (sugerowany zestaw do polerowania Enamel Shiny).

UWAGA: naprawiana powierzchnia musi być czysta i wolna od zanieczyszczeń olejowych, a także pozostałości środków polerujących. Opakery należy nanosić cienkimi warstwami w celu zapewnienia pełnej polimeryzacji i zapobieżenia osłabienia połączenia.

CZAS ROBOCZY: 1 minuta (powyżej 1 minuty siła wiązania bondu ulega redukcji)

Przechowywanie: < 25 ° C. Szczelnie zamykać strzykawki i chronić przed dostępem światła.

Nie stosować po upływie terminu przydatności.

Efekty uboczne: bardzo rzadkie

Przeciwwskazania: alergia na któryś z komponentów systemu.

Wytwórca: GDF mbH, Rosbach, Niemcy

Dystrybutor: Micerium S.p.A. Via Marconi 83, 16030 Avegno (GE) Włoch

CE 0297